


# Инструкция по забору материала

## Забор материала



**1 Шаг:** Купите или вырежьте конверты из листа А4 (НЕ использовать клей) – если не будет наших конвертов

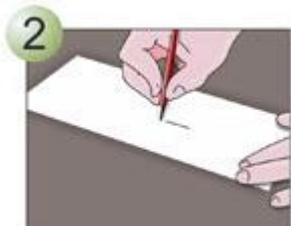

**2 Шаг:** Подпишите конверты участников. Ф.И.О., возраст, пол, дата, Ф.И.О. кто брал.




**3 Шаг:** Возьмите ватную палочку (если нет зонда) и проведите 25-30 раз ватным концом по внутренней поверхности щеки с усилием для сбора эпителиальных клеток.



**4 Шаг:** Отложите использованные ватные палочки на 3-5 минут для высыхания (использование при высушивании нагревательных приборов недопустимо, нельзя дуть на палочку), после чего положите Ватные палочки (2 шт. с одного человека) в конверт (не кладите палочку в полиэтиленовую упаковку!) Не используйте слюну для заклеивания конверта.




**5 Шаг:** Забор повторить, т.к. на каждого человека должно быть два образца.

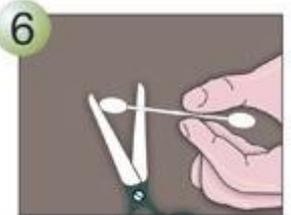

**6 Шаг:** В случае с ватными палочками: используемую часть палочки отстричь сразу в конверт, отрезав и выбросив конец палочки, за который держались рукой. НЕ прикасайтесь к используемой части палочки!



**7 Шаг:** Закройте конверт и начните взятие образцов у остальных участников (начинайте с пункта 3 для каждого из участников)

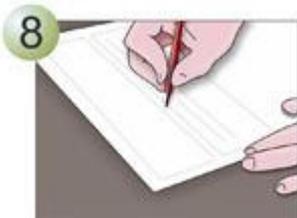

**8 Шаг:** Заполните бланк заказа ДНК-теста.